


Ivoclean

Corretta detersione dopo la messa in prova

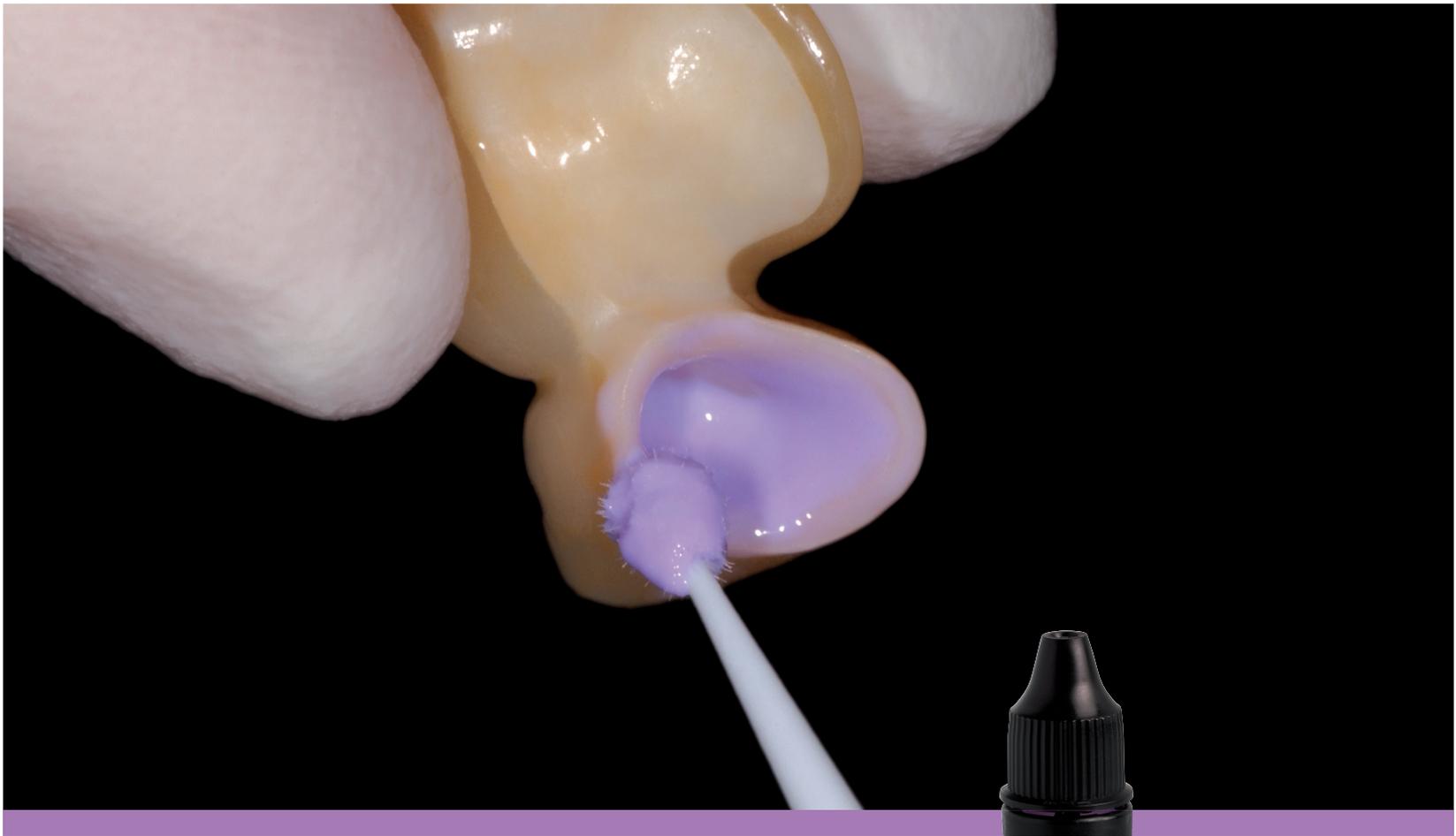

| Efficace | Universale | Semplice


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Ivoclean

Ivoclean é la pasta efficace ed universale per la detersione di superfici di adesione di restauri protesici dopo la messa in prova – per una successiva ottimale cementazione adesiva.

Durante la messa in prova (TRY-IN) la contaminazione con saliva o sangue delle superfici del restauro é inevitabile. Questa contaminazione, nella successiva cementazione adesiva definitiva del restauro indiretto, rappresenta un problema.

La detersione di superfici contaminate da saliva con acido fosforico funziona senza problemi soltanto per le vetroceramiche. Questo metodo di pulizia é tuttavia controindicato per le ceramiche a base di ossido di zirconio, nonché per le leghe vili, a causa della deattivazione superficiale attraverso l'acido fosforico.

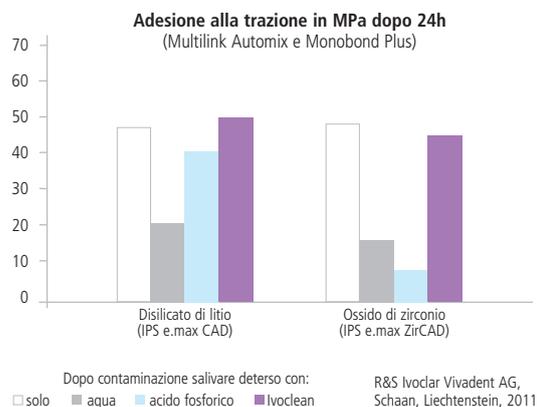

EFFICACE

Con Ivoclean si detergono efficacemente superfici di contatto dei restauri contaminate da saliva, creando in tal modo la base per un legame duraturo e stabile fra cemento adesivo e restauro.

UNIVERSALE

Ivoclean agisce su tutti materiali da restauro:

- Vetroceramica
- ceramica all'ossido di zirconio
- ceramica all'ossido di alluminio
- leghe nobili
- leghe vili
- restauri indiretti in composito

SEMPLICE

Applicare Ivoclean sulle superfici di contatto, lasciare agire per 20 secondi e quindi sciacquare accuratamente con acqua. Infine asciugare le superfici di contatto con aria priva di olio.



Messa in prova



Applicare Ivoclean e lasciare agire per 20 secondi



Sciacquare



Asciugare

Confezionamento:

1 flacone Ivoclean 5g
 Refill 637568AN



Questo prodotto fa parte dei campi di competenza „All-Ceramics“ e „Implant Esthetics“. I prodotti di questi campi sono calibrati tra loro in modo ottimale.

Descrizione e dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi.
 Stampato in Italia
 © Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
 05.09.2011/i

Ivoclar Vivadent s.r.l.

Via Isonzo 67/69
 I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
 Tel. +39 051 / 611 35 55
 Fax +39 051 / 611 35 65
 www.ivoclarvivadent.it

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation