

Variolink® Esthetic

Il cemento composito estetico

L'ESTETICA STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE

Ideale per
IPS e.max®
CAD/Press

Ideale per
Tetric® CAD



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation


Variolink® Esthetic



Variolink Esthetic è il cemento composito estetico, con indurimento a luce e duale per la cementazione definitiva di restauri in ceramica e composito di elevata qualità.



Eccezionale estetica

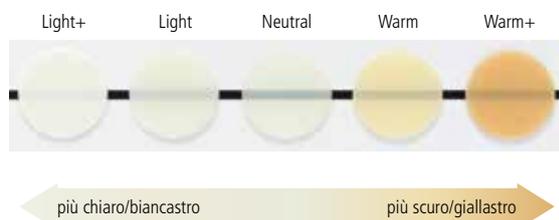

Il concetto cromatico Effect

Per coordinare l'effetto cromatico dei restauri in modo preciso ai denti contigui, Ivoclar Vivadent ha sviluppato il nuovo, equilibrato concetto cromatico Effect. Il colore „Neutral“, grazie alla sua elevata trasparenza, provvede ad una cementazione cromaticamente neutra del restauro. I colori „Light“ e „Light+“ consentono uno schiarimento graduale; i colori „Warm“ e „Warm+“ e di scurire gradualmente i restauri in ceramica e composito sovrastanti.


Eccellente stabilità cromatica



Variolink Esthetic è straordinariamente stabile nel colore. Questo è reso possibile dal brevettato fotoiniziatore altamente reattivo Ivocerin®, che non necessita di alcun co-iniziatore contenente ammine. Variolink Esthetic rappresenta la base per risultati esteticamente convincenti. Anche in caso di irradiazione con luce intensa ed in ambiente umido, Variolink Esthetic non subisce alcuna visibile variazione cromatica.

L'eccezionale estetica di Variolink Esthetic viene completata da una naturale fluorescenza simile ai denti naturali.

Il cemento composito presenta inoltre anche un'ottima resistenza all'abrasione. Questa, durante la permanenza del restauro, provvede ad una buona qualità dei margini.

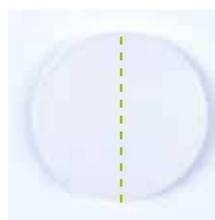

Variolink Esthetic
Suntest (secondo ISO4049),
metà sinistra irradiata



Variolink Esthetic
Riferimento dopo conservazione in acqua



Lavorazione pratica

Facile rimozione delle eccedenze

Finora, i cementi compositi, in seguito alla difficoltosa rimozione delle eccedenze, sono stati considerati come piuttosto difficili da lavorare. Da questo punto di vista Variolink Esthetic definisce nuovi standard.

Grazie alla sua intelligente combinazione fra il fotoiniziatore reattivo Ivocerin ed un controllore della luce, dopo una breve pre-polimerizzazione, le eccedenze possono essere rimosse molto facilmente.



Ulteriori informazioni nel video:
www.ivoclarvivadent.com/vleien



Consistenza flessibile, a seconda della situazione


Il Viscosity Controller unisce in modo ideale l'ottima fluidità con la stabilità di Variolink Esthetic. Questo si nota particolarmente durante l'estrusione dalla siringa, nel fluire del materiale in eccesso dalla fuga cementizia e nella stabilità delle eccedenze lungo la fuga.

Ulteriori informazioni nel video:
www.ivoclarvivadent.com/vlewen



Diagnosi radiografica convincente

In riguardo alla radiopacità, Variolink Esthetic prosegue la tradizione del suo predecessore Variolink II. L'elevata radiopacità rende più semplice il rilevamento delle eccedenze di cemento o della carie secondaria.

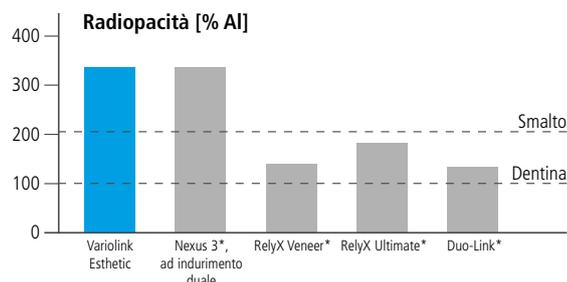

* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
 Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (misurazione secondo ISO 4049)

Un sistema integrato per il successo clinico



Adesione ottimale


Adhese® Universal è un adesivo monocomponente indicato nelle procedure restaurative dirette ed indirette. Nell'esclusivo confezionamento in VivaPen® completa Variolink Esthetic nella cementazione di restauri dalle elevate esigenze estetiche.

Adhese Universal è compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura e consente di gestire in modo flessibile le situazioni cliniche.

La tolleranza alla tecnica e agli errori di Adhese Universal, consente valori di adesione costantemente elevati e minimizza il rischio di sensibilità postoperatorie.

Naturalmente Variolink Esthetic può essere utilizzato anche insieme ai noti adesivi Syntac® ed ExcITE® F.

Resistenza al taglio dopo polimerizzazione duale – Tecnica di mordenzatura selettiva dello smalto su smalto e dentina dopo 10.000 termocicli

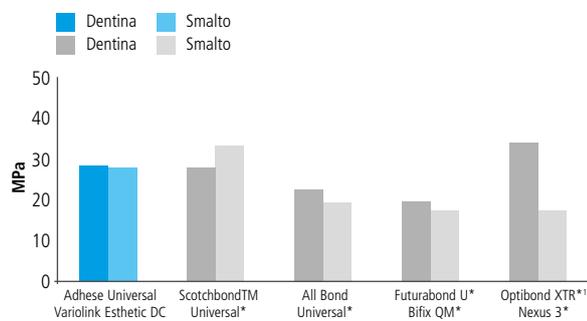


¹ Self-Etch-Technik, da Optibond XTR für die selektive Schmelzätzung nicht indiziert ist.
* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein (2015)

Soluzione ideale per restauri in vetroceramica

In combinazione con Monobond Etch & Prime®, il primo Primer per vetroceramica automordenzante al mondo, Variolink Esthetic ottiene un'eccellente adesione su restauri in vetroceramica come per smpio IPS e.max® CAD/Press oppure IPS Empress® CAD/Esthetic.

Il primer monocomponente per ceramica che mordenza e silanizza le superfici ceramiche in una sola fase di lavoro. La sgradevole mordenzatura delle superfici di contatto con acido fluoridrico non è necessaria.

Forza adesiva alla trazione sulla vetroceramica al disilicato di litio IPS e.max® CAD, iniziale e dopo invecchiamento

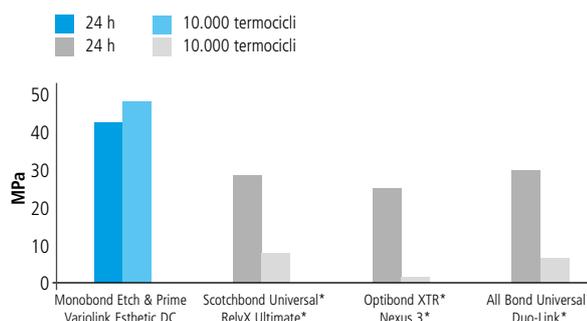

* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Ideale per
IPS e.max®
CAD/Press






Utilizzatori entusiasti

Il 96 % dei partecipanti a un'indagine presso gli utilizzatori si sono dichiarati soddisfatti o molto soddisfatti di Variolink Esthetic. Gli utilizzatori sono risultati particolarmente convinti dall'estetica e dalla forza di adesione del cemento composito. Inoltre anche la consistenza e la facile lavorazione hanno trovato grande riscontro. Il 98% dei testatori ha integrato Variolink Esthetic nella loro prassi quotidiana.

Gli utilizzatori hanno valutato così le principali caratteristiche del prodotto:

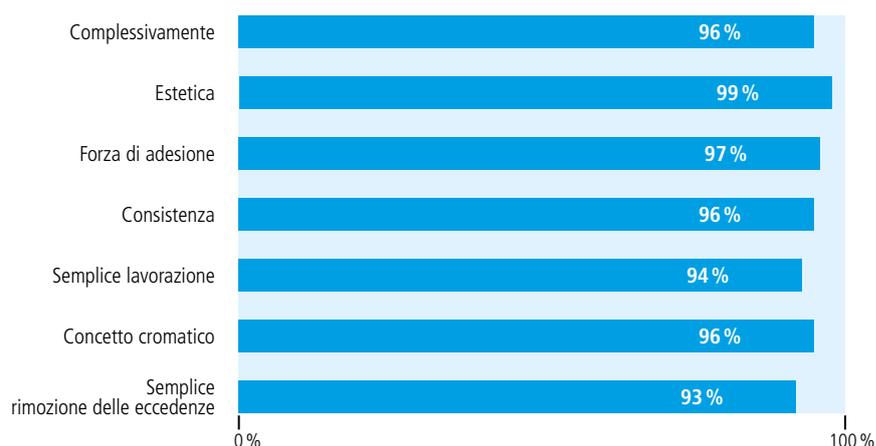

Fonte: Ivoclar Vivadent AG, Indagine di mercato (ca. 700 partecipanti) in Europa/USA, settembre 2016



Esperti convinti



” Variolink Esthetic è il materiale perfetto per restauri di elevate esigenze estetiche. Offre un’ottima estetica ed è facilmente lavorabile. ”

Prof. Daniel Edelhoff
Germania



” Con il nuovo Variolink Esthetic si possono integrare perfettamente restauri estetici come p.es. faccette. Oltre alla facile lavorazione, apprezzo l’adesivo consigliato Adhese Universal, utilizzabile per tutte le tecniche di mordenzatura. ”

Dr. Andreas Kurbad
Germania



” Variolink Esthetic unisce la semplicità di utilizzo, risultati estetici e la base scientifica di un prodotto di successo. ”

Dr. Alessandro Devigus
Svizzera



” Variolink Esthetic mi consente di essere fedele al produttore di un sistema dalla A alla Z. Grazie ad Adhese Universal ed alla consistenza cremosa di Variolink Esthetic, la cementazione di restauri in ceramica IPS e.max diventa un vero piacere. Le eccedenze sono facili da eliminare. ”

Dr. Torsten Seidensticker
Svizzera



” Grazie al campo di indicazioni universale di Variolink Esthetic, nel mio lavoro quotidiano, posso eseguire tutte le cementazioni con questo sistema. Inoltre, le diverse caratteristiche del materiale di questo sistema, come la facile rimozione delle eccedenze, l’estetica, la radiopacità nonché la compatibilità con l’adesivo Adhese Universal, sono perfettamente coordinate con le esigenze dell’impiego clinico. ”

Dr. Knut Hufschmid
Austria





Confezionamenti

Variolink Esthetic LC System Kit (puramente fotoindurente)

3 siringhe Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 siringa Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, oppure 1 flacone, 5 g
1 flacone Monobond Plus, 5 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

666433WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml
666065WW con Adhese Universal flacone, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (ad indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 siringa Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, oppure 1 flacone, 5 g
1 flacone Monobond Plus, 5 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

666434WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml
666125WW con Adhese Universal flacone, 5 g

Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max

(puramente fotoindurente)

3 siringhe Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 siringa Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
1 flacone Monobond Etch & Prime, 5 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

681493WW

Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max (ad indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
1 siringa Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
1 flacone Monobond Etch & Prime, 5 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

681492WW

Variolink Esthetic DC Starter Kit (ad indurimento duale)

1 siringa automiscelante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (neutral)
1 siringa Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (neutral)
1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
1 flacone Monobond Plus, 1 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

6817593WW

Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max

(ad indurimento duale)

1 siringa automiscelante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (neutral)
1 siringa Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (neutral)
1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
1 flacone Monobond Etch & Prime, 1 g
1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
Diversi accessori

687592WW

Variolink Esthetic LC Refill (puramente fotoindurente)

1 siringa, 2 g (nel colore scelto)

5 cannule di applicazione

666126WW Light+

666127WW Light

666128WW Neutral

666129WW Warm

666130WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (ad indurimento duale)

1 siringa automiscelante, 5 g (nel colore scelto)

10 puntali di miscelazione

666117WW Light+

666118WW Light

666119WW Neutral

666120WW Warm

666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (ad indurimento duale)

1 siringa automiscelante, 9 g (nel colore scelto)

15 puntali di miscelazione

666122WW Light

666123WW Neutral

666124WW Warm

Variolink Esthetic DC Refill x 3 (ad indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti, 9 g (nel colore scelto)

45 puntali di miscelazione

692424WW Light

692425WW Neutral

692426WW Warm

Variolink Esthetic Try-In-Paste Refill

1 siringa, 1,7 g (nel colore scelto)

5 cannule di applicazione

666067WW Light+

666113WW Light

666114WW Neutral

666115WW Warm

666116WW Warm+

Accessori

645951 Mixing Tips short tapered, Refill, 15 pezzi

559224 Cannule d'applicazione Variolink, Refill, 20 pezzi

Indicazione versatili

Prodotto	Variolink® Esthetic	
Modalità d'indurimento	LC fotoindurente ¹	DC ad indurimento duale
Adesivo consigliato	Adesivo: Adhese® Universal	
Vetroceramiche p.es. IPS Empress®		
Faccette	✓	✓
Inlays / Onlays / Corone parziali	✓	✓
Corone		✓
Disilicato di litio p.es. IPS e.max® CAD/Press		
Faccette (faccette oclusali)	✓	✓
Inlays / Onlays / Corone parziali	✓	✓
Corone / Ponti		✓
Ceramiche a base di ossidi (ossido di zirconio) p.es. IPS e.max® ZirCAD		
Corone / Ponti		✓
Perni radicolari		
Ceramiche ibride e compositi p.es. Tetric® CAD		
Faccette	✓	✓
Inlays / Onlays	✓	✓
Corone		✓
Perni radicolari (p.es. FRC Postec® Plus)		
Metallo / supportato da metallo		
Inlays / Onlays / Corone parziali		✓
Corone / Ponti		✓
Ponti Maryland		✓
Perni radicolari		

¹ Restauri con uno spessore < 2 mm e sufficiente traslucenza

Cementation Navigation System


La via d'uscita dal labirinto della cementazione

Cementation Navigation System, l'apprezzata applicazione multimediale, è di aiuto nella scelta dell'ideale materiale da fissaggio in pressoché tutte le situazioni, sia su sostanza dentale naturale che su abutment implantari. Inoltre il CNS indica quali possibilità vengono offerte dai materiali da fissaggio Ivoclar Vivadent.

Con dettagliate animazioni, l'applicazione conduce attraverso il protocollo di utilizzo, dalla rimozione del restauro provvisorio fino alla successiva fluorizzazione.

www.cementation-navigation.com

- Dettagliate animazioni in 3D
- Istruzioni passo per passo
- Semplice utilizzo

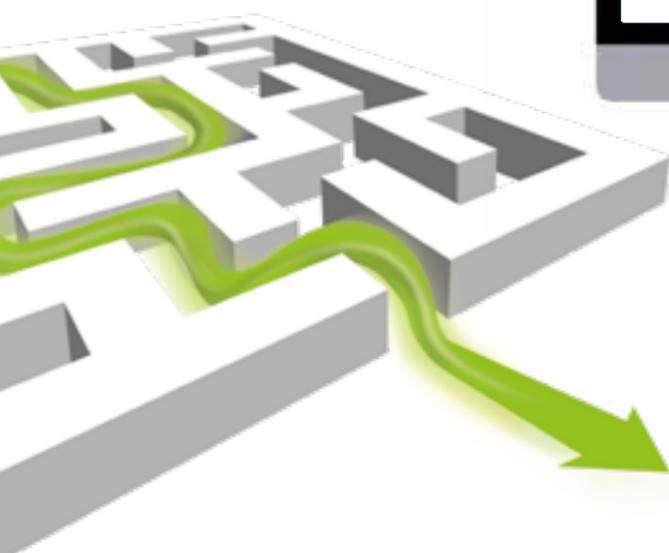



Protesi fissa

Variolink® Esthetic è un prodotto della categoria „Protesi fissa“. I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall'attuazione del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.



QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



Una soluzione per tutte le indicazioni

- Materiali altamente resistenti e altamente estetici per la tecnologia Press e CAD/CAM
- Disilicato di litio (LS₂) ed ossido di zirconio (ZrO₂) unici nel loro genere: dalla faccetta sottile fino al ponte esteso
- Cementazione flessibile: adesiva, autoadesiva e convenzionale

Fluor Protector S

La lacca protettiva contenente fluoro



La lacca di protezione omogenea in tubetto dosatore

- Imediata fluorizzazione dello smalto
- Produttivo deposito di fluoro
- Gusto delicato

Desidera saperne di più sui prodotti della categoria „Protesi fissa“?
Per informazioni visiti il sito www.ivoclarvivadent.it

Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.
Stampato in Italia
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
2019-03-13/IT

ivoclar
vivadent
passion vision innovation