



Protesi fissa

Monobond® Etch & Prime appartiene alla categoria "Protesi Fissa". I prodotti di questa categoria supportano il professionista nel corso dell'intero iter di realizzazione di restauri protesici fissi – dall'attuazione del provvisorio al mantenimento e alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti di questa categoria sono appositamente calibrati tra loro, per garantire una lavorazione e un'applicazione ottimali e dunque il pieno successo clinico.



QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DELLA CATEGORIA:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



Un sistema per tutte le indicazioni

- Materiali altamente estetici e resistenti per le tecniche di pressatura e CAD/CAM
- Ceramiche al disilicato di litio (LS₂) e all'ossido di zirconio (ZrO₂) uniche, per coprire l'intero spettro di indicazioni della ceramica integrale: dalle faccette sottili ai ponti estesi
- Flessibilità nella cementazione: adesiva, autoadesiva, convenzionale

Variolink® Esthetic

Il cemento composito estetico



Il cemento composito dai risultati estetici eccezionali e una lavorazione straordinariamente semplice...

- Sistema cromatico "Effect", bilanciato ed essenziale
- Formulazione priva di amine, per una stabilità cromatica eccezionale
- Facile e precisa rimozione delle eccedenze

Desiderate maggiori dettagli sui prodotti della categoria "Protesi fissa"? Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il vostro referente Ivoclar Vivadent o visitate il sito www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent s.r.l.
via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.it

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi e non sono vincolanti.
Stampato in Italia
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
2015-04-02/IT

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

NUOVO

Monobond® Etch & Prime

Primer automordenzante per vetroceramica



Mordenza e silanizza in un solo passaggio



ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Monobond® Etch & Prime

Per il buon esito della cementazione adesiva, le superfici di unione del restauro devono essere adeguatamente preparate. Un passaggio cruciale dell'intera catena. I restauri in vetroceramica vengono convenzionalmente preparati mordenzando la superficie di unione con acido idrofluoridrico, e quindi applicando un agente legante silano. La mordenzatura con acido idrofluoridrico tuttavia non è molto amata per via del suo potenziale tossico.

Monobond® Etch & Prime è il primo primer per vetroceramica al mondo che consente al dentista di mordenzare e silanizzare le superfici di vetroceramica in un solo facile passaggio. Inoltre, la soluzione deterge contemporaneamente la superficie da qualsiasi residuo di saliva.

Tutto in un flacone

Grazie all'innovativa combinazione in un unico flacone del nuovo primer per ceramica e dell'agente legante al silano, basta un solo prodotto per condizionare le vetroceramiche. Così anche le scorte risultano al minimo.

La preparazione delle superfici di unione del restauro con i sistemi tradizionali prevede l'uso di almeno due diversi prodotti:



Tempi più brevi

Unire mordenzatura e silanizzazione in un unico prodotto abbrevia notevolmente la procedura di condizionamento dei restauri vetroceramici. Per una lavorazione ancor più semplice e rischi d'errore ancor più ridotti.

Procedura con Monobond® Etch & Prime:



Procedura convenzionale




Legame stabile e durevole


L'innovativa formulazione di Monobond Etch & Prime assicura un'elevata reattività tra la vetroceramica e il primer.

La reattività tra le superfici ceramiche e l'agente legante al silano viene garantita dall'azione del nuovo condizionatore per ceramica. Assieme formano un forte legame chimico.

Questa ottimale interazione offre un'alternativa più delicata all'acido idrofluoridrico nel pretrattamento delle vetroceramiche. Ecco perché anche i restauri condizionati in laboratorio possono essere nuovamente pretrattati con Monobond Etch & Prime.

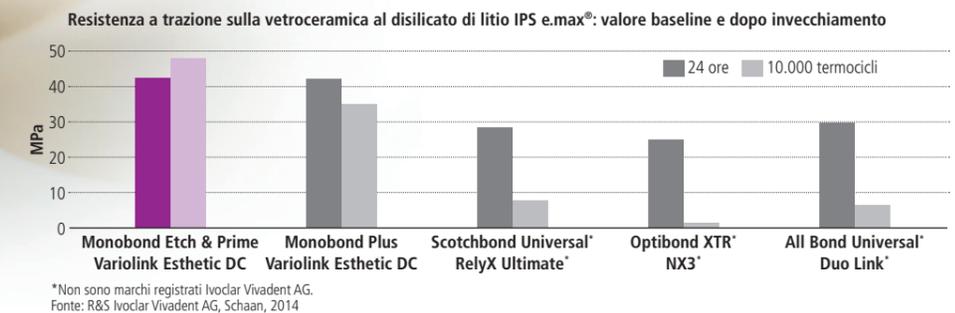

Monobond Etch & Prime può essere utilizzato con tutti i cementi compositi su base metacrilata e su tutte le vetroceramiche.

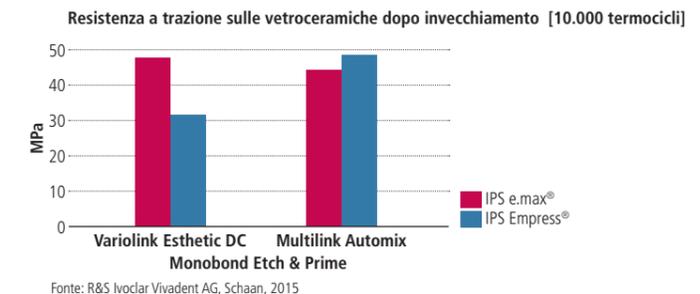

Riferimenti per ordinazione

Refill 673026WW
1 flacone Monobond Etch & Prime, 5 g



La via d'uscita dal labirinto della cementazione

Il Cementation Navigation System è la nuova applicazione multimediale Ivoclar Vivadent, per offrire ai dentisti un orientamento pratico e una guida utile nella selezione del cemento più idoneo al singolo caso.

www.cementation-navigation.com