

IPS e.max[®] Ceram Selection



all ceramic
all you need

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

IPS e.max® Ceram Selection

Le nuove masse smalto ed Effect di IPS e.max® Ceram Selection entusiasmano con colori brillanti ed impressionanti caratteristiche foto-ottiche.

IPS e.max Ceram Selection comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale.

I rinomati Odontotecnici Oliver Brix (Germania), August Bruguera (Spagna) e Gérald Ubassy (Francia) hanno dato la loro impronta determinante al concetto dell'IPS e.max Ceram Selection. Le masse dalla speciale colorazione ed il loro utilizzo, sono il risultato di pluriennale lavoro di successo con IPS e.max Ceram.

I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi:

- Special Enamel – masse smalto colorate
- Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce
- Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce



Made to
create nature

Nate dalla passione
e dall'esperienza ...



Handwritten signature of Oliver Brix in black ink.



aqua citrine honey apricot quartz

... con l'obiettivo, di copiare
perfettamente la natura ...



Handwritten signature of August Bruguera in black ink.



diamond silk fog

... e con l'esigenza,
di condividere queste conoscenze.



Handwritten signature of Gérald Ubassy in black ink.



salmon cream lavender taupe

Special Enamel

Le sei masse **Special Enamel** sono masse smalto di diversa colorazione con una traslucenza simile allo smalto.



Light Reflector

Le tre masse **Light Reflector** sono masse Effect che riflettono la luce.



cream



salmon



silk

Light Absorber

Le tre masse **Light Absorber** sono masse Effect che assorbono la luce.



fog



lavender



taupe



Guida alla selezione del materiale

Colore e traslucenza

(Piastrina cromatica con 1 mm di spessore)

Gruppo

Special Enamel

aqua

Massa smalto intensiva a supporto
lungo i margini incisali.



Esempio del posizionamento

Descrizione prodotto

dell'effetto di traslucenza bluastro



Campo di impiego



► Area dello smalto



► Area intermedia



► Area dello smalto

► Area intermedia



► Area intermedia

► Area dentinale

Effetto naturale



Special Enamel

aqua

Massa smalto intensiva a supporto dell'effetto di traslucenza bluastro lungo i margini incisali.





Special Enamel

citrine

Massa smalto giallastra per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.



Special Enamel

honey

Massa smalto color miele per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.






Special Enamel

apricot

Massa smalto color albicocca per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.

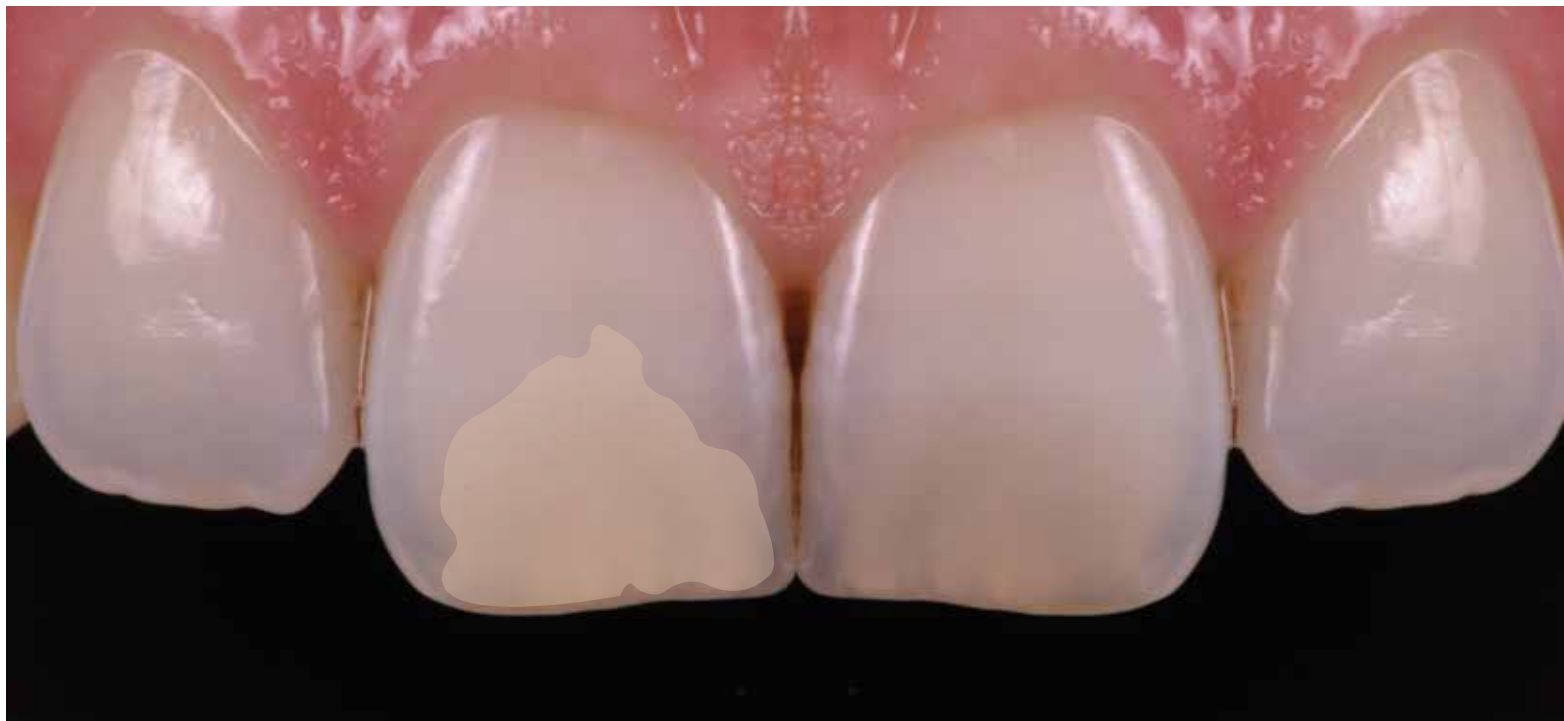

Special Enamel

quartz

Massa smalto grigio caldo per regolare il grado di saturazione ed il croma, nonché per accentuare la zona dello smalto.



Special Enamel

diamond



Smalto universale di colore neutro per i settori anteriori.



Light Reflector

cream

Massa Effect di colore crema per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale.

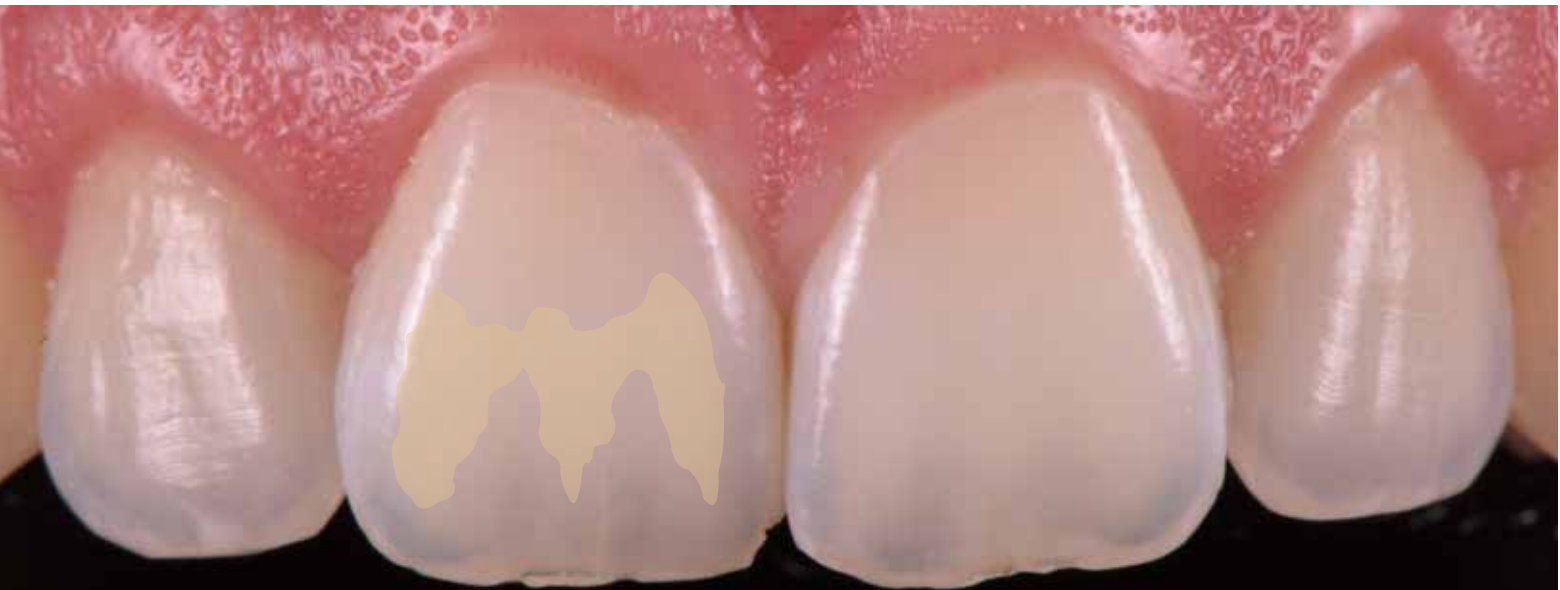
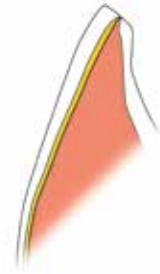




Light Reflector

salmon

Massa Effect di colore salmone per imitare le zone cromaticamente riflettenti nel terzo cervicale e nel terzo incisale.

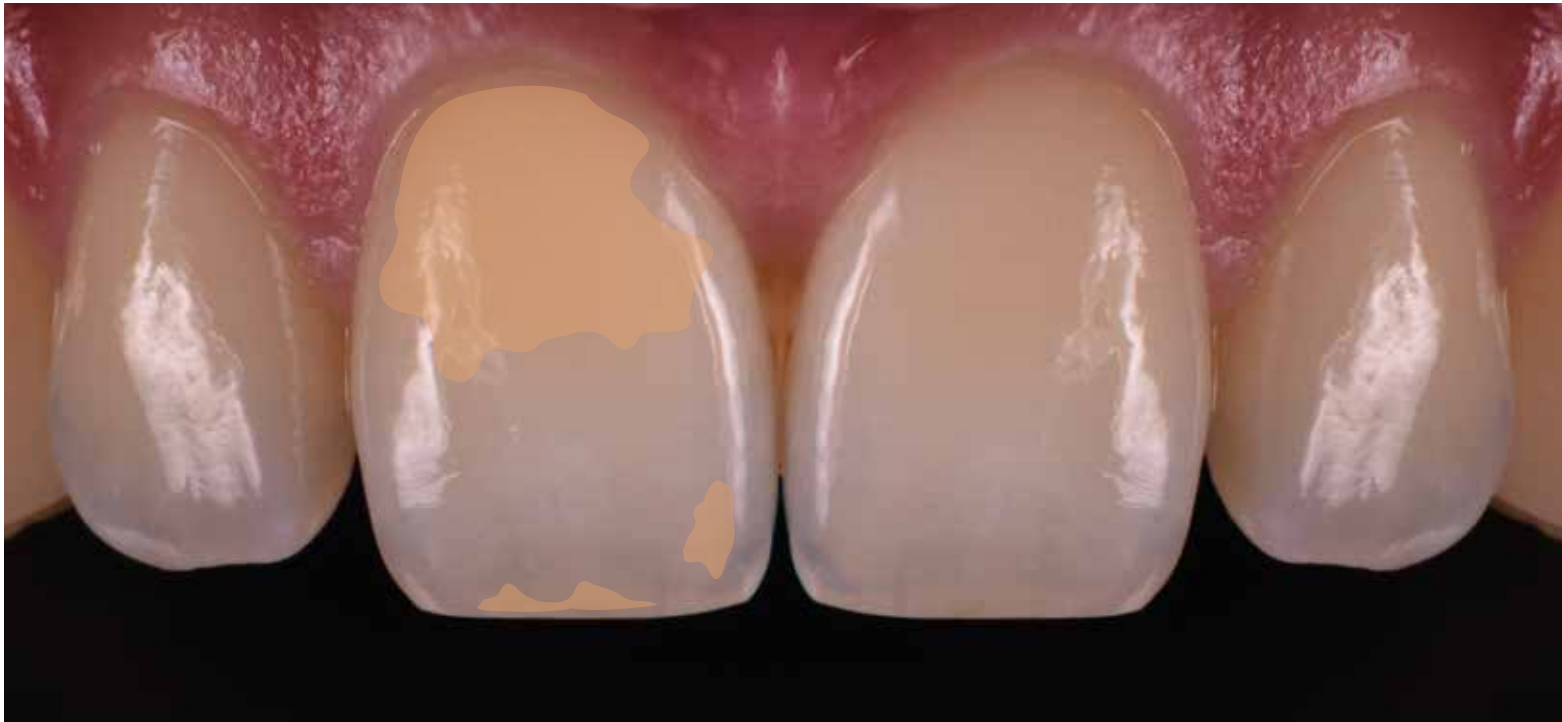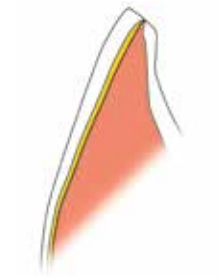



Light Reflector

silk

Massa Effect biancastra per aumentare la luminosità nell'area dello smalto.





Light Absorber

fog

Massa Effect grigiastra per ridurre la luminosità nell'area dello smalto.



Light Absorber

lavender

Massa Effect di colore violetto per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali.





Light Absorber

taupe

Massa Effect di colore violetto-marrone per la modellazione di zone di assorbimento nel terzo incisale e cervicale e nelle zone prossimali.



Confezionamenti

IPS e.max® Ceram Selection Kit

- IPS e.max Ceram Special Enamel, 5 g, 1 x colori: aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond
- IPS e.max Ceram Light Reflector, 5 g, 1 x colori: cream, salmon, silk
- IPS e.max Ceram Light Absorber, 5 g, 1 x colori: fog, lavender, taupe



Ricambi



IPS e.max Ceram Special Enamel, 1x 5 g

Colori: aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond



IPS e.max Ceram Light Reflector, 1x 5 g

Colori: cream, salmon, silk



IPS e.max Ceram Light Absorber, 1x 5 g



Colori: fog, lavender, taupe







IPS e.max® Ceram Selection

Special Enamel

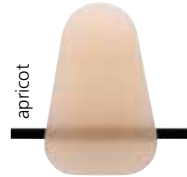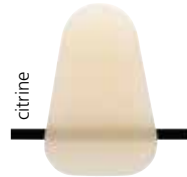

Light Reflector

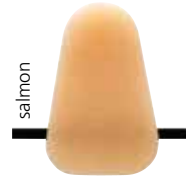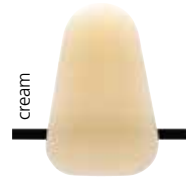

Light Absorber

