

Variolink® Esthetic

Il cemento composito estetico



L'estetica
straordinariamente
semplice

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Variolink® Esthetic

L'estetica straordinariamente semplice

Variolink® Esthetic è il cemento composito estetico, a fotoindurimento ed indurimento duale, per la cementazione definitiva di restauri in ceramica e composito di elevata qualità.

Eccezionale estetica

Sistema con effetto cromatico equilibrato e compatto, eccellente stabilità di colore e fluorescenza naturale.

Semplice di lavorazione

Facile rimozione delle eccedenze, consistenza flessibile ed adeguata al caso, diagnosi radiografica convincente.

Un sistema integrato per il successo clinico

- adesione ottimale al tessuto duro dentale, in abbinamento con Adhese® Universal
- Soluzione ideale per restauri in vetroceramica, in abbinamento con Monobond Etch & Prime®
- Uso universale grazie a Monobond® Plus

Apprezzato da utilizzatori ed esperti

Utilizzatori entusiasti ed esperti confermano i vantaggi di Variolink® Esthetic.



96%

Utilizzatori soddisfatti
con Variolink® Esthetic*




Eccezionale estetica



Il concetto cromatico Effect


Per coordinare l'effetto cromatico dei restauri in modo preciso ai denti contigui, Ivoclar Vivadent ha sviluppato il nuovo, equilibrato concetto cromatico Effect

Il colore „Neutral“, grazie alla sua elevata trasparenza, restituisce una cementazione cromaticamente neutra del restauro. I colori „Light“ e „Light+“ producono un graduale effetto di schiarimento, mentre i colori „Warm“ e „Warm+“ consentono un progressivo scurimento dei restauri in ceramica e composito sovrastanti.

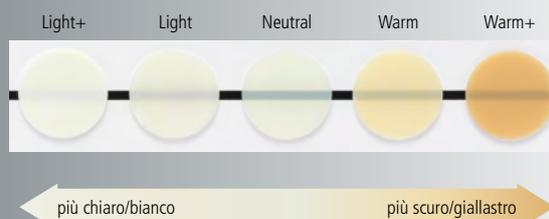


Eccellente stabilità cromatica

Variolink Esthetic è straordinariamente stabile nel colore. Questo è reso possibile dal brevettato fotoinziatore altamente reattivo Ivocerin®, che non necessita di alcun co-inziatore contenente ammine. Anche in caso di irradiazione di luce intensa ed in ambiente umido, Variolink Esthetic non subisce alcuna visibile variazione cromatica.

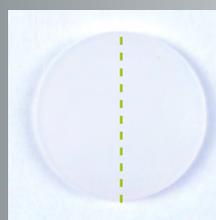

Variolink® Esthetic
Suntest (secondo ISO4049),
metà sinistra irradiata

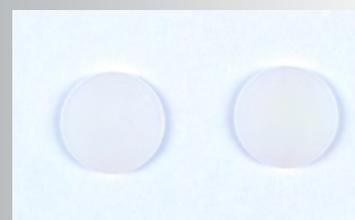

Variolink® Esthetic
riferimento

Dopo conservazione
in acqua

L'eccezionale estetica di Variolink Esthetic è completata da una naturale fluorescenza simile ai denti naturali. Il cemento composito dimostra inoltre un'ottima resistenza all'abrasione, assicurando nel tempo una buona qualità dei margini del restauro.



Semplicità di lavorazione

Facile rimozione delle eccedenze

Variolink Esthetic, a tal proposito, definisce nuovi standard. Grazie all'intelligente combinazione tra il fotoiniziatore reattivo Ivocerin ed un filtro fotosensibile, dopo una breve prepolimerizzazione, le eccedenze possono essere rimosse molto facilmente.



Ulteriori informazioni nel video:

www.ivoclarvivadent.it/vleit



Consistenza flessibile, a seconda della situazione

Il Viscosity Controller unisce in modo ottimale la fluidità con la stabilità. Ciò si nota particolarmente durante l'estrusione dalla siringa. Il materiale in eccesso fluisce uniformemente dalla fuga cementizia, ma rimane stabile nelle eccedenze lungo la fuga, così da poterle prontamente rimuovere.




Ulteriori informazioni nel video:

www.ivoclarvivadent.it/vleitaly



Diagnosi radiografica convincente

L'elevata radiopacità di Variolink Esthetic rende più semplice il rilevamento delle eccedenze di cemento e della carie secondaria.

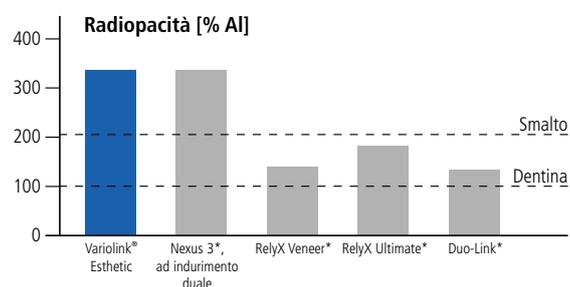

* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (misurazione secondo ISO 4049)

Un sistema integrato per il successo clinico


Adesione ottimale

Adhese® Universal è un adesivo monocomponente fotoindurente, indicato nelle procedure restaurative dirette ed indirette. Nell'esclusivo confezionamento in VivaPen® completa in modo ottimale Variolink Esthetic nella cementazione di restauri dalle elevate esigenze estetiche.

Adhese Universal è compatibile con tutte le tecniche di mordenzatura e consente di gestire in modo flessibile le situazioni cliniche. L'alta tolleranza agli errori nella tecnica di Adhese Universal consente di mantenere costantemente elevati valori di adesione e minimizza il rischio di sensibilità postoperatorie.

Naturalmente Variolink Esthetic può essere utilizzato anche in combinazione ai noti adesivi Syntac® ed Excite® F.

Resistenza al taglio dopo indurimento duale – mordenzatura selettiva dello smalto su smalto e dentina dopo 10.000 termocicli

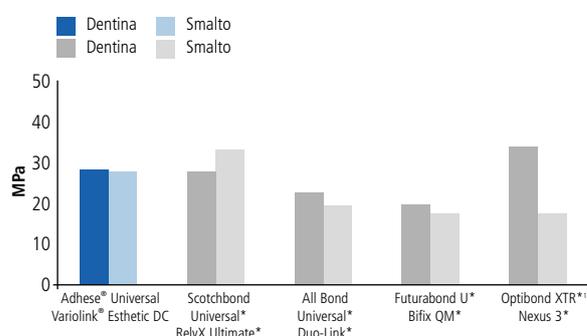

¹ Tecnica Self-Etch, in quanto Optibond XTR non è indicato per la mordenzatura selettiva dello smalto.
* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013 – 2015



BEWÄHRT MIT
IPS e.max®
ZirCAD


Adesione affidabile su superfici di restauri

Variolink Esthetic, usato in combinazione con Monobond® Plus, l'innovativo primer universalmente testato a livello clinico, assicura un'eccellente adesione su restauri in ossido di zirconio e vetroceramica. Questo primer inoltre, grazie alla sua combinazione di monomeri adesivi brevettata, permette di raggiungere un'adesione duratura su leghe di metallo vili e nobili.



Stabilità dell'adesione su ossido di zirconio di diversi primer/sistemi adesivi

Valori di forza adesiva alla trazione dopo 150 giorni di conservazione in acqua e 37.500 termocicli.

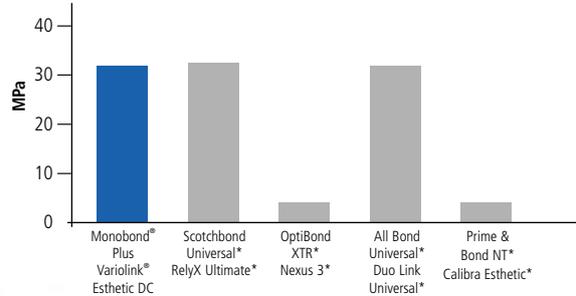

* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: Elsayed et al. ; J Adhes Dent 2017; 19: 221-228


Soluzione ideale per restauri in vetroceramica

In combinazione con Monobond Etch & Prime®, il primo Primer per vetroceramica automordenzante al mondo, Variolink Esthetic ottiene un'eccellente adesione su restauri in vetroceramica come, per esempio, IPS e.max® CAD/Press oppure IPS Empress® CAD/Esthetic.

Con il primer monocomponente per ceramiche è possibile mordenzare e silanizzare in un unico passaggio. La sgradevole mordenzatura delle superfici di contatto con acido fluoridrico non è più necessaria.

IDEAL FÜR
IPS e.max®
CAD/Press

Forza adesiva alla trazione sulla vetroceramica al disilicato di litio IPS e.max® CAD, iniziale e dopo invecchiamento

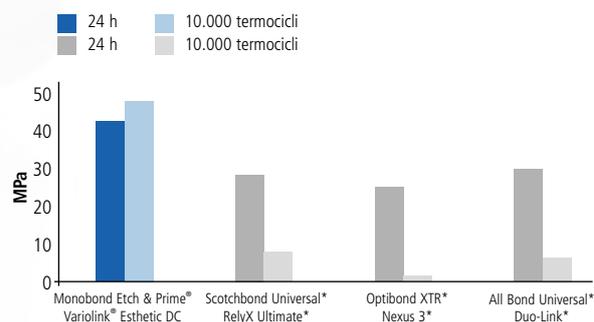

* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: R&S Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Utilizzatori entusiasti

Il 96 % dei partecipanti ad un'indagine presso gli utilizzatori si sono dichiarati da soddisfatti a molto soddisfatti di Variolink Esthetic. Gli utilizzatori sono risultati particolarmente convinti dall'estetica e dalla forza di adesione del cemento composito. Anche la consistenza e la facile lavorazione hanno trovato grande riscontro. Il 98% dei partecipanti al test ha integrato Variolink Esthetic nella propria prassi quotidiana.

Valutazioni degli utilizzatori in merito alle principali caratteristiche del prodotto:



Fonte: Ivoclar Vivadent AG, Indagine di mercato (ca. 700 partecipanti) in Europa/USA, settembre 2016

Esperti soddisfatti

// Variolink Esthetic è il materiale perfetto per restauri di elevate esigenze estetiche. Offre un'ottima estetica ed è facilmente lavorabile. //

Prof. Daniel Edelhoff
Germania



// A seconda della situazione clinica, Variolink Esthetic mi permette di scegliere fra un cemento composito ad indurimento duale oppure soltanto a luce, con possibilità di utilizzare la stessa pasta Try-in! Per me come operatore è quindi la soluzione perfetta. //

Dr. Giacomo Derchi
Italia



// Variolink Esthetic unisce la semplicità di utilizzo, risultati estetici e la base scientifica di un prodotto di successo. //

Dr. Alessandro Devigus
Svizzera



// Variolink Esthetic mi consente di essere fedele al produttore di un sistema dalla A alla Z. Grazie ad Adhese Universal ed alla consistenza cremosa di Variolink Esthetic, la cementazione di restauri in ceramica IPS e.max diventa un vero piacere. Le eccedenze sono facili da eliminare. //

Dr. Torsten Seidensticker
Svizzera



// Grazie al campo di indicazioni universale di Variolink Esthetic, nel mio lavoro quotidiano, posso eseguire tutte le cementazioni con questo sistema. Inoltre, le diverse caratteristiche del materiale di questo sistema, come la facile rimozione delle eccedenze, l'estetica, la radiopacità nonché la compatibilità con l'adesivo Adhese Universal, sono perfettamente coordinate con le esigenze dell'impiego clinico. //

Dr. Knut Hufschmidt
Austria



Applicazioni versatili


Variolink® Esthetic	LC fotoindurente ¹	DC ad indurimento duale
Adesivo consigliato	Adhese® Universal	
Vetroceramiche p.es. IPS Empress®		
Faccette	✓	✓
Inlays / Onlays / Corone parziali	✓	✓
Corone		✓
Disilicato di litio p.es. IPS e.max® CAD / Press		
Faccette (faccette occlusali)	✓	✓
Inlays / Onlays / Corone parziali	✓	✓
Corone / Ponti		✓
Ceramiche a base di ossido (ossido di zirconio) p.es. IPS e.max® ZirCAD		
Corone / Ponti		✓
Perni radicolari		

Variolink® Esthetic	LC fotoindurente ¹	DC ad indurimento duale
Adesivo consigliato	Adhese® Universal	
Ceramiche ibride e compositi p.es. Tetric® CAD		
Faccette	✓	✓
Inlays / onlays	✓	✓
Corone		✓
Perni radicolari p.es. FRC Postec® Plus		
Metallo / supportato da metallo		
Inlays / Onlays / Corone parziali		✓
Corone / Ponti		✓
Ponti Maryland		✓
Perni radicolari		

¹ Restauri con uno spessore < 2 mm e sufficiente traslucenza

Istruzioni chiare

Tramite animazioni dettagliate, il Cementation Navigation System mostra in modo semplice e diretto come applicare Variolink Esthetic nella cementazione dei rispettivi restauri.

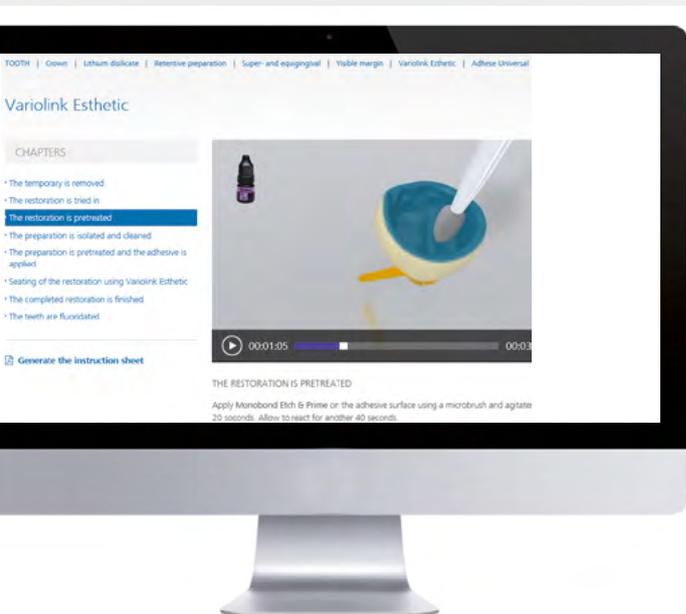

www.cementation-navigation.com/it/a/prodotti/variolink-esthetic



Confezionamenti

Variolink® Esthetic LC System Kit (solo fotoindurimento)

3 siringhe Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
 3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
 1 siringa Total Etch, 2 g
 1 Adhese® Universal VivaPen® 2 ml, oppure 1 flacone, 5 g
 1 flacone Monobond Plus, 5 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

666433WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666065WW con Adhese Universal flacone, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
 3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
 1 siringa Total Etch, 2 g
 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, oppure 1 flacone, 5 g
 1 flacone Monobond Plus, 5 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

666434WW con Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666125WW con Adhese Universal flacone, 5 g

Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max® (solo fotoindurimento)

3 siringhe Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
 3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
 1 siringa Total Etch, 2 g
 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
 1 flacone Monobond Etch & Prime, 5 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

681493WW

Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max (indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
 3 siringhe Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
 1 siringa Total Etch, 2 g
 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
 1 flacone Monobond Etch & Prime, 5 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

681492WW

Variolink Esthetic DC Starter Kit (indurimento duale)

1 siringa automiscelante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (neutral)
 1 siringa Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (neutral)
 1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
 1 flacone Monobond Plus, 1 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

687593WW

Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max (indurimento duale)

1 siringa automiscelante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (neutral)
 1 siringa Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (neutral)
 1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
 1 flacone Monobond Etch & Prime, 1 g
 1 siringa Liquid Strip, 2,5 g
 Accessori vari

687592WW

Variolink Esthetic LC Refill (solo fotoindurimento)

1 siringa, 2 g (nel colore scelto)
 5 cannule di applicazione
 666126WW Light+
 666127WW Light
 666128WW Neutral
 666129WW Warm
 666130WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (indurimento duale)

1 siringa automiscelante, 5 g (nel colore scelto)
 10 puntali di miscelazione
 666117WW Light+
 666118WW Light
 666119WW Neutral
 666120WW Warm
 666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (indurimento duale)

1 siringa automiscelante, 9 g (nel colore scelto)
 15 puntali di miscelazione
 666122WW Light
 666123WW Neutral
 666124WW Warm

Variolink Esthetic DC 3er Refill (indurimento duale)

3 siringhe automiscelanti, 9 g (nel colore scelto)
 45 puntali di miscelazione
 692424WW Light
 692425WW Neutral
 692426WW Warm
 716646WW Neutral (2x) und Warm (1x)

Variolink Esthetic Try-In-Paste ricambio

1 siringa, 1,7 g (nel colore scelto)
 5 cannule di applicazione
 666067WW Light+
 666113WW Light
 666114WW Neutral
 666115WW Warm
 666116WW Warm+

Accessori

645951 puntali di miscelazione, short, pointed, 15 pezzi
 559224 cannule di applicazione Variolink, 20 pezzi

Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 3555
Fax +39 051 611 3565
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

IT/2020-06-30



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation