

Monobond® Plus

Il primer universale



Semplicemente
universale

Ideato per **uso universale**

Il corretto condizionamento delle superfici di unione di un restauro rappresenta un passaggio cruciale nella catena del processo adesivo. Monobond® Plus è il primer universale per il condizionamento delle superfici di tutti i materiali da restauro.


Un primer per una vasta gamma di materiali diversi

Monobond Plus si distingue per la combinazione innovativa di tre diversi monomeri adesivi funzionali: metacrilati di acido fosforico, metacrilati di silano e metacrilati di solfuro. Questa combinazione consente al primer universale di legarsi a ceramiche all'ossido di zirconio, vetroceramiche e leghe di metallo, generando un legame ottimale, equiparabile a quello ottenuto con agenti leganti per singoli materiali.



Resistenza alla trazione di Multilink® Automix e Monobond® Plus sui diversi materiali

[Valori di resistenza alla trazione dopo immersione in acqua per 167 giorni e 37.500 termocicli]

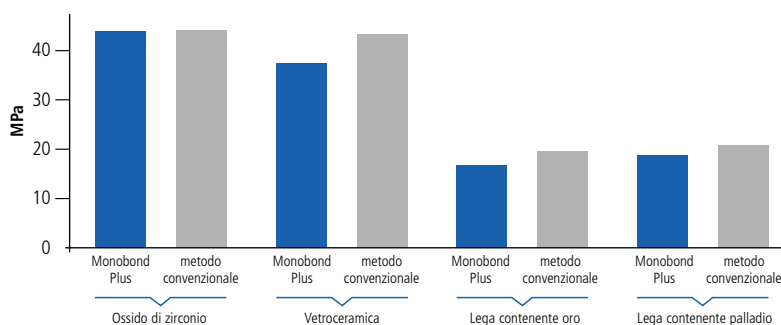




Prestazioni eccezionali

Rispetto ad altri adesivi universali, Monobond Plus garantisce un'adesione stabile e duratura, sia su materiali in ossido di zirconio sia su materiali in vetroceramica.

Durata dell'adesione su ossido di zirconio e disilicato di litio in combinazione con vari sistemi di primer/adesivi

[Valori di resistenza alla trazione dopo immersione in acqua per 150 giorni e 37.500 termocicli]

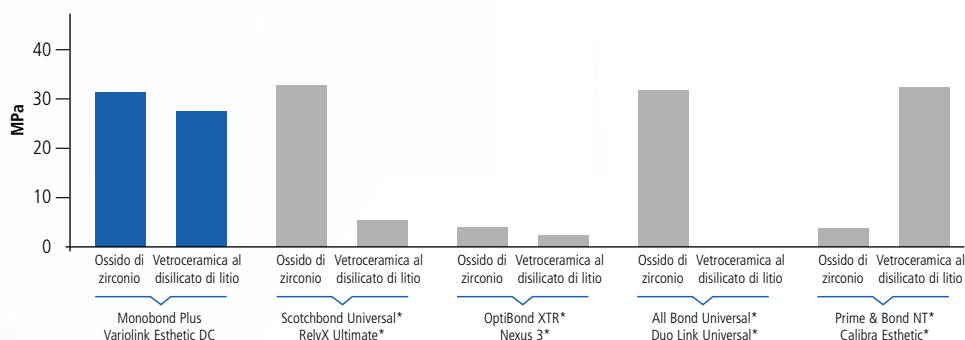

* Non sono marchi registrati Ivoclar Vivadent AG.
Fonte: Elsayed et al.; J Adhes Dent 2017; 19: 221-228

Semplice applicazione

Dopo aver pretrattato la superficie di adesione del restauro tramite mordenzatura o sabbiatura, indipendentemente dal materiale utilizzato, l'applicazione di Monobond Plus è la medesima: applicare, attendere 60 s, disperdere le eccedenze – fatto!

Ossido di zirconio
Leghe di metallo

Sabbiatura

Vetroceramica

Mordenzatura

Applicare

Attendere

disperdere

La gestione delle scorte risulta facile ed efficiente con Monobond Plus: un primer universale che può essere conservato a temperatura ambiente - non più tanti primer diversi, di cui alcuni termosensibili!

Confezionamento

Refill

1 flacone Monobond Plus 5gr, 626221AN



Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 3555
Fax +39 051 611 3565
www.ivoclarvivadent.com

IT/2020-06-22


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation